

CALCIPAST FORTE

Паста гидроксид кальция с йодоформом и п-хлорфенолом

CE 1011

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ: гидроксид кальция, йодоформ, сульфат бария, п-хлорофенол, камфара.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продукт CALCIPAST FORTE предназначен для использования при стоматологической обработке в качестве материала для временного заполнения корневого канала. Он улучшает восстановление поврежденных околочервоточечных тканей, он оказывает высушивающее действие на экссудаты корневых каналов

Он обладает реминерализирующим действием на ткани зуба, благодаря высокому содержанию в нем гидроксида кальция.

Продукт не имеет корневого канала. pH $\approx$ 8.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Поместить присоединяемый аппликатор на содержащий продукт шприц.

Нанести продукт в канал, удалить избыток пасты, надежно закрыть полость.

Оставить заполнение в полости или в корневом канале на период от 1 недели до 30 дней.

Продукт предназначен для многократного использования за исключением аппликатора, который только для однократного применения.

Многократное применение аппликатора может вызвать риск повторной инфекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять CALCIPAST FORTE для пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Вреден при проглатывании. Является раздражителем для глаз и кожи.

Действует раздражающе на слизистые оболочки ротовой полости.

В случае контакта немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании внутрь не вызывать рвоту. Выпить большое количество воды и обратиться за медицинской помощью.

При работе с продуктом необходимо использовать резиновый (внутриротовой) изолятор слюны.

Использовать перчатки, защитные очки и защитную одежду.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°C.

Хранить в недоступных детям местах. Срок годности указан на основной упаковке.

После открытия упаковки срок годности не изменяется, если продукт тщательно закрывается после каждого использования. Защищать продукт от солнечного света.

ОБРАЩЕНИЕ С УПАКОВКОЙ ПРОДУКТА

Пустые контейнеры должны утилизироваться в соответствии с нормативами.

УПАКОВКА

Шприц 2,1 г с препаратом, одноразовые аппликаторы.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Phone/fax 00 48 15 842 35 85