

CITRIC ACID 40%

Жидкость для промывки корневых каналов

CE 2409

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ: раствор 40% лимонной кислоты

УПАКОВКА:

Бутылочки 200 г

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Жидкость используется во время эндодонтической обработки для промывки корневых каналов.

Улучшает механическую очистку корневых каналов.

Продукт удаляет замасленные слои со стенок корневых каналов, открывая отверстия зубных канальцев.

Нанесение

CITRIC ACID 40 % нетоксичный продукт для человеческого тела. И также не является вредным веществом для окружающего пространства.

CITRIC ACID 40 % действует на замасленные слои, удаляя их со стенок и открывая отверстия зубных канальцев. Это ведет к тщательной очистке зубных канальцев от остатков пульпы и затем к хорошему проникновению пломбировочного материала.

Адаптер с поршнем для набора жидких препаратов в шприц

1. Открутить крышку бутылочки.

2. Поместить адаптер в горлышко бутылки и плотно вдавить.

3. Чтобы привести в готовность, удалить синюю пробку. Закрутить конец шприца в отверстие адаптера, наклонить бутылочку с препаратом вниз головой и набрать жидкость в шприц, удерживая одновременно адаптер. Затем поставить бутылочку головой вверх на стол и аккуратно выкрутить шприц из адаптера. Рекомендуется использовать шприц с наконечником Люэра с резиновым поршнем.

5. Для переноски снять адаптер и закрутить крышку бутылочки на бутылочку.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Ввести препарат в канал, используя шприц с иглой, расположенной таким образом, чтобы жидкость текла непосредственно к стенке канала. Рекомендуется использовать иглу с боковым отверстием вблизи кончика иглы. При промывке корневого канала не использовать слишком сильный поток жидкости, поскольку это может вызвать проникновение жидкости в околоверхушечные ткани и повредить их. После применения продукта рекомендуется промыть канал физиологическим раствором.

Рекомендуется использовать резиновый (внутриротовой) изолятор слюны. Избегать длительного контакта со слизистой оболочкой – это может вызывать раздражение.

После открытия упаковки срок годности не изменяется, если продукт тщательно закрывается после каждого использования.

Пустые контейнеры должны утилизироваться в соответствии с нормативами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Продукт является раздражителем для глаз. В случае контакта с глазами промыть большим количеством воды, во время промывания держать веки открытыми. Избегать длительного контакта с кожей.

Рекомендуется использовать защиту для глаз и защитные перчатки. Не применять продукт для пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам продукта. Продукт подвергается полному биоразложению.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой и оригинальной упаковке при температуре ниже 25°C.

Хранить в недоступных детям местах.

ВСТРЯХИВАТЬ ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ!



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Phone/fax 00 48 15 842 35 85