

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ: хлоргексидина диглюконат, вода Евр. Фарм..

УПАКОВКА:

Бутылочки 200 г

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Жидкость используется для промывки корневых каналов для удаления остатков.

Улучшает подготовку корневых каналов.

ПРОДУКТ СМАЗЫВАЕТ КОРНЕВОЙ КАНАЛ ВО ВРЕМЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Адаптер с пробкой для набора жидких препаратов в шприц

1. Открутить крышку бутылочки.

2. Поместить адаптер в горлышко бутылки и плотно вдавить.

3. Чтобы привести в готовность, удалить синюю пробку. Закрутить конец шприца в отверстие адаптера, наклонить бутылочку с препаратом вниз головой и набрать жидкость в шприц, удерживая одновременно адаптер. Затем поставить бутылочку головой вверх на стол и аккуратно выкрутить шприц из адаптера. Рекомендуется использовать шприц с наконечником Люэра с резиновым поршнем.

5. Для переноски снять адаптер и закрутить крышку бутылочки на бутылочку.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Ввести жидкость в корневой канал с помощью шприца с иглой с боковым отверстием во время механической подготовки. Обильно промыть каналы, примерно 10 мл на один канал.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять продукт для пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Продукт может вызывать раздражение слизистой оболочки полости рта. В случае контакта немедленно промыть водой. При попадании внутрь выпить большое количество воды. Не вызывать рвоту.

Обратиться за медицинской помощью.

При работе с продуктом необходимо использовать резиновый (внутриротовой) изолятор слюны.

Рекомендуется использовать персональное защитное оборудование (очки, защитный козырек, перчатки).

ВНИМАНИЕ! При промывке корневых каналов обязательно промывать физиологическим раствором между промывкой гипохлоритом натрия и хлоргексидина диглюконатом. Это предотвращает осаждение рыжеватого отложения. Обильно промывать.

ХРАНЕНИЕ

Защищать продукт от солнечного света.

Хранить в недоступных детям местах.

Пустые контейнеры должны утилизироваться в соответствии с нормативами.

Не использовать продукт после срока годности, указанного на упаковке.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°C.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Phone/fax 00 48 15 842 35 85