

ZINC OXIDE

Оксид цинка

CE₁₀₁₁

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ: оксид цинка, Евр. Фарм.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продукт ZINC OXIDE рекомендуется для приготовления паст, в основном с Эвгенолом, используемым в качестве материала для временного заполнения полостей и корневых каналов.

Смесь оксида цинка с эвгенолом в качестве временного наполнителя обладает высушивающим действием и стимулирует создание вторичного дентина.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Для временного заполнения дефектов смесь должна быть выполнена таким образом, чтобы она не могла прилипнуть ни к стеклянному контейнеру, ни к шпателью.

2. Для временного заполнения корневых каналов приготовленная смесь должна иметь консистенцию крема.

Оставить заполнение пост или корневого канала на время от 1 недели до 30 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять продукт для пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Может вызывать раздражение глаз. В случае контакта немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. В случае попадания внутрь выпить большое количество воды, не вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.

При работе с продуктом необходимо использовать резиновый (внутриротовой) изолятор слюны. Использовать перчатки, защитные очки и защитную одежду.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°C. Защищать от влаги.

Хранить в недоступных детям местах.

Срок годности указан на основной упаковке.

После открытия упаковки срок годности не изменяется, если продукт тщательно закрывается после каждого использования.

Защищать от солнечного света.

ОБРАЩЕНИЕ С УПАКОВКОЙ ПРОДУКТА

Пустые контейнеры должны утилизироваться в соответствии с нормативами.

УПАКОВКА

Контейнер с 50 г препарата.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85

Последнее обновление: 20.09.2013/1